



链接全球高端技术 服务人类生命健康

LINK THE GLOBAL
HIGH-END TECHNOLOGY
TO SERVE HUMAN LIFE
AND HEALTH



一次性使用病毒采样管



深圳市亿立方生物技术有限公司 SHENZHEN YILIFANG BIOTECH CO.,LTD.
地址：深圳市南山区高新中一道 10 号生物孵化器 2-309
深圳市坪山区宝山路 16 号海科兴战略新兴产业园 B 栋 9 楼 01 区
电话：400-8063168 0755-86962192
邮箱：info@yilifangbio.com
网址：www.yilifangbio.com

深圳市亿立方生物技术有限公司
SHENZHEN YILIFANG BIOTECH CO.,LTD.

《 主要用途

用于呼吸道样本的采集、运输和储存，轻松取代多种采集工具，其通用性可精简实验室标本管理流程中的所有步骤，原采集标本还可作为备份。

《 产品特点



安全性高



核酸稳定



操作方便



适用性广

《 采样拭子



植绒材质拭子


对病毒无毒性作用，不含脂肪酸、藻酸钙、RNA 酶，能收集到更多的呼吸道上皮细胞，比传统拭子具有更好的样本采集和洗脱能力，能有效提高病毒检测的阳性率。



带 3cm 折断点

拭子塑料杆为 ABS 材料，采用独特的可折断设计，易折且折断过程无微小碎屑产生。

《 样本保存液

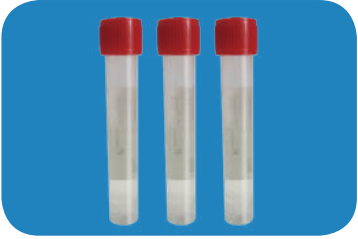

经典型保存液

保存病毒生存力方面性能卓越

经典型保存液中含有冷冻保护剂、氨基酸等成分，可在较宽的温度范围内最大限度地维持病毒活性和侵染能力，降低病毒分解速度，提升病毒分离培养的阳性率。



灭活型保存液


保存病毒核酸完整性方面性能卓越

灭活型保存液中含有强力去垢剂，能彻底灭活样本中病毒、细菌等病原体，保证生物安全。保存液中含有保护核酸成分，充分保证核酸的稳定性和完整性，保证病毒核酸检测的灵敏度。


《 采样管

- 防漏设计
管盖采用特殊螺旋结构设计，有效确保管内封闭状态，液体无渗漏，使用产品更加安全。
- 聚丙烯材质采样管
采样管采用聚丙烯材质制成，耐高压、耐低温，适用于标本的携带和存放。


《 操作方法

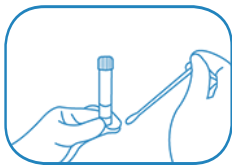


根据采样需求，用采样拭子采集样本

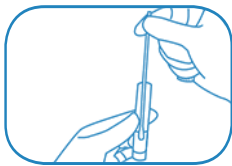


将采集样本之后的拭子放置到采样管中

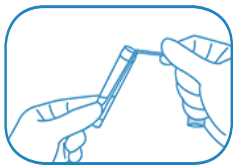

沿折痕处折断拭子杆

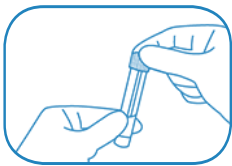

拧紧采样管盖子

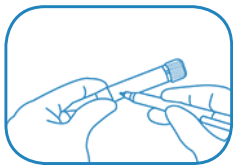

在采样管标签上按要求标注信息

《 产品组分

型号	材料名称	性质
1	采样管	聚丙烯材质
2	盐、生物缓冲剂、冷冻保护剂、氨基酸等	经典型物料
3	EDTA、胍盐等灭活剂	灭活型物料
4	拭子	带有拭子杆可折

《 储存条件及有效期



置 2℃ -35℃条件下保存



避免阳光直射



有效期 12 个月

《 产品规格

型号	组成成分
YF-A-5-3.5	25 人份 / 盒，每人份含 5ml 采样管（内含 3.5ml 经典型保存液）和拭子
YF-A-10-3.5	25 人份 / 盒，每人份含 10m1 采样管（内含 3.5ml 经典型保存液）和拭子
YF-A-15-6	25 人份 / 盒，每人份含 15m1 采样管（内含 6ml 经典型保存液）和拭子
YF-A-50-10	25 人份 / 盒，每人份含 50m1 采样管（内含 10ml 经典型保存液）和拭子
YF-B-5-3.5	25 人份 / 盒，每人份含 5m1 采样管（内含 3.5ml 灭活型保存液）和拭子
YF-B-10-3.5	25 人份 / 盒，每人份含 10m1 采样管（内含 3.5ml 灭活型保存液）和拭子
YF-B-15-6	25 人份 / 盒，每人份含 15m1 采样管（内含 6ml 灭活型保存液）和拭子
YF-B-50-10	25 人份 / 盒，每人份含 50m1 采样管（内含 10ml 灭活型保存液）和拭子